


静脈留置針イントロカン

イントロカンセーフティは安全機構が自動的に作動するパッシブタイプの静脈留置針です。今までの静脈留置針と同じ使い方方でユーザーを針刺し事故から守ります。製品には留置針に40年以上の経験を持つビー・ブラウンエースクラブ社のアイデアが集結しています。

Product highlight

- 血管に優しいポリウレタン製カテーテル
- 容易なカテーテル操作を可能にしたプッシュオフプレート
- カテーテルキンクのリスクを低減するラウンドエッジハブ

イントロカン セーフティ3

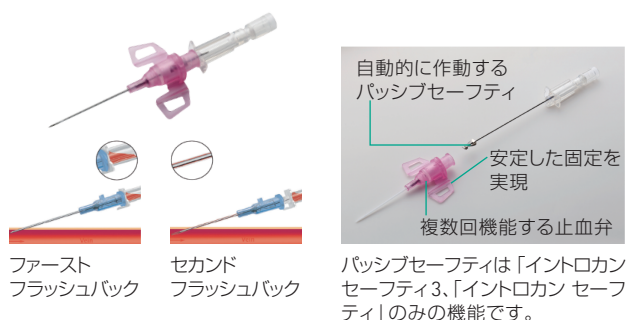

イントロカン サート




イントロカン セーフティ



ラウンドエッジハブ

- カテーテルハブの内側を円錐状に加工することで、屈曲によるカテーテルの耐キンク（耐閉塞）性を高めました。
- キンク（閉塞）による輸液量低下のリスクを低減します。

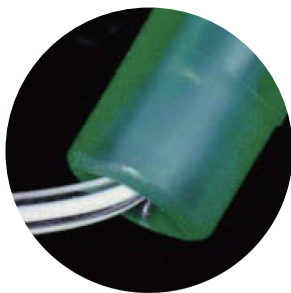


バックカット

- 組織損傷が少ない加工方法です。




ダブルフラッシュバックシステム

カテーテルの血管外留置（誤留置）防止に貢献する逆血の確認方法です。

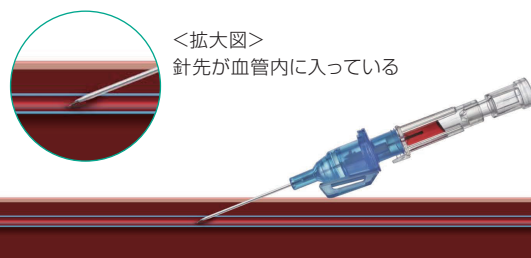

①ファースト（ニードル）フラッシュバック

- 穿刺後、針先が血管内に入っていれば、チャンパー内（透明部分）が赤くなります。

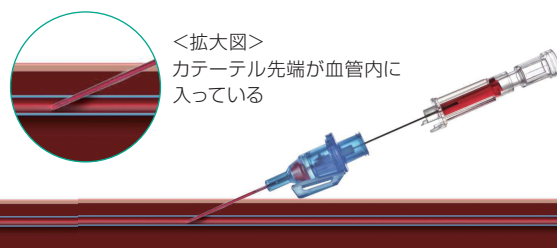

②セカンド（カテーテル）フラッシュバック


- カテーテルを進めた時、カテーテル先端が血管内に入っていれば、カテーテルが赤くなります。

複数回機能する止血弁

- 輸液前に採血をする部署（救急・外来等）では有用です。
- 圧迫止血が不要です。

だから「複数回機能する止血弁」

カテーテルハブ内に内蔵された止血弁により、穿刺後のカテーテルハブからの血液流出を抑制し、医療従事者、患者様の血液曝露防止に貢献します。

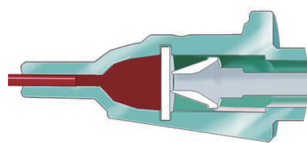

止血弁は「イントロカン セーフティ3」のみの機能です。

薬液調整用器具 / T型ポート付延長チューブ

■ 薬液調整用器具

ミニスパイクプラス



グリーンキャップ



ブルーキャップ



- 使いやすいグリップ付
- プラスチック針なので、コアリングのリスクを軽減できます。
- 接続口には、接触し難い構造かつキャップにより接続口の汚染のリスクを軽減できます。
- エア通過ルート側に0.45 μ mのエアフィルター内蔵
- 薬液流路側に5 μ mパーティクルフィルター内蔵
- ※ ブルーキャップのみ

ディスペンシングピン



DP1500



DP 3500L



- 使いやすいグリップ付
- プラスチック針なので、コアリングのリスクを軽減できます。
- 高流量による注入・吸引が可能
- 接続口には、クローズドバルブを内蔵。薬液漏れを防止します。
- エア通過ルート側に0.3 μ mのエアフィルター内蔵
- ※ DP1500のみ

■ T型ポート付延長チューブ

輸液ラインに接続し、末梢側にあるインジェクションポートから薬液の注入が可能です。インジェクションポートはニードルインタイプとニードルレスタイプをご用意しています。

ニードルインジェクションタイプ



シリンジインジェクションタイプ



■ ET-04T

12.1cm 延長チューブ付 ルアースリップ
ニードルインジェクションタイプ

● 内容量: 0.25 mL ● 入数: 100個/箱

■ ET-04TS

12.1cm 延長チューブ付 ルアーロック
ニードルインジェクションタイプ

● 内容量: 0.25 mL ● 入数: 100個/箱

■ SET-04TSL

12.7cm 延長チューブ付 ロックスリップ
シリンジインジェクションタイプ

● 内容量: 0.47 mL ● 入数: 100個/箱

※ 延長ケーブルはすべてDEHP可塑剤フリーです。

※ ニードルインジェクションタイプは、シリンジに注射針がついたままで接続可能です。

※ シリンジインジェクションタイプは、シリンジからの注射針を外してシリンジ接続してください。

静脈留置針(針刺し防止機構付) イントロカン セーフティ 3		
品番	品名/規格/入数	申込番号
4251127-03	イントロカン セーフティ 3 パルプ付 0.7mm(24G) × 19mm 50本 (分割販売)	vb01613
4251128-03	イントロカン セーフティ 3 パルプ付 0.9mm(22G) × 25mm 50本 (分割販売)	vb01614
4251129-03	イントロカン セーフティ 3 パルプ付 1.1mm(20G) × 25mm 50本 (分割販売)	vb01615
4251130-03	イントロカン セーフティ 3 パルプ付 1.1mm(20G) × 32mm 50本 (分割販売)	vb01616
4251131-03	イントロカン セーフティ 3 パルプ付 1.3mm(18G) × 32mm 50本 (分割販売)	vb01617
4251132-03	イントロカン セーフティ 3 パルプ付 1.3mm(18G) × 45mm 50本 (分割販売)	vb01618

※ 最少包装単位: 200本

静脈留置針 イントロカン サート		
品番	品名/規格/入数	申込番号
4251326	イントロカン サート 1.1mm(20G) × 32mm 50本 (分割販売)	vb01601
4253329	イントロカン サート ウイング付 1.1mm(20G) × 32mm 50本 (分割販売)	vb01602
4251318	イントロカン サート 0.9mm(22G) × 25mm 50本 (分割販売)	vb01603
4253310	イントロカン サート ウイング付 0.9mm(22G) × 25mm 50本 (分割販売)	vb01604
4251300	イントロカン サート 0.7mm(24G) × 19mm 50本 (分割販売)	vb01605
4253302	イントロカン サート ウイング付 0.7mm(24G) × 19mm 50本 (分割販売)	vb01606

※ 最少包装単位: 200本

静脈留置針(針刺し防止機構付) イントロカン セーフティ		
品番	品名/規格/入数	申込番号
4251628-03	イントロカン セーフティ 0.9mm(22G) × 25mm 50本 (分割販売)	vb01607
4253540-03	イントロカン セーフティ ウイング付 0.9mm(22G) × 25mm 50本 (分割販売)	vb01608
4251601-03	イントロカン セーフティ 0.7mm(24G) × 19mm 50本 (分割販売)	vb01609
4253523-03	イントロカン セーフティ ウイング付 0.7mm(24G) × 19mm 50本 (分割販売)	vb01610
4251644-03	イントロカン セーフティ 1.1mm(20G) × 32mm 50本 (分割販売)	vb01611
4253566-03	イントロカン セーフティ ウイング付 1.1mm(20G) × 32mm 50本 (分割販売)	vb01612

※ 最少包装単位: 200本

薬剤調製用器具 ミニスパイク プラス		
品番	品名/規格/入数	申込番号
4550242	ミニスパイク プラス グリーンキャップ 50個 (分割販売)	vb01619
4550242	ミニスパイク プラス グリーンキャップ 10個 (分割販売)	vb01620
4550234	ミニスパイク プラス ブルーキャップ 50個 (分割販売)	vb01621
4550234	ミニスパイク プラス ブルーキャップ 10個 (分割販売)	vb01622

※ 最少包装単位: 100個

薬剤調製用器具 ディスペンシングピン		
品番	品名/規格/入数	申込番号
412000	ディスペンシングピン DP-1500 分割販売単位 10個 (分割販売)	vb01623
413501	ディスペンシングピン DP-3500L 分割販売単位 10個 (分割販売)	vb01624

※ 最少包装単位: 50個

T型ポート付延長チューブ		
品番	品名/規格/入数	申込番号
471950	T型ポート付延長チューブ ET-04T 20個 (分割販売)	vb01625
471954	T型ポート付延長チューブ ET-04TS 20個 (分割販売)	vb01626
471987	T型ポート付延長チューブ SET-04TSL 20個 (分割販売)	vb01627

※ 最少包装単位: 100個